


fisiopress

FP 50

PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE PROFESSIONALE PORTATILE
VERSIONE ESTETICA



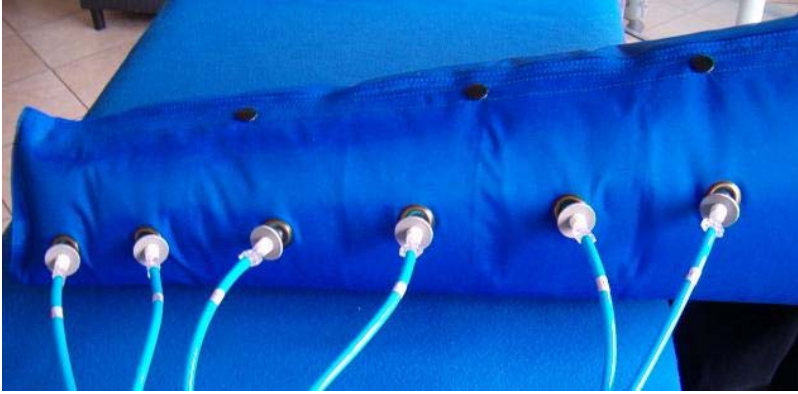

APPARECCHIATURA E SUOI ACCESSORI

Unità base	050UBE
Gambale/piede (6 settori)	050G5/000PNT
Bracciale (6 settori)	050B6
Fascia Addominale (2 settori)	000FA2
Set di Duplicazione	050SD6
Gambaletto sottoginocchio (6 settori)	050GP6
Estensore (serve per incrementare la dimensione circolare del gambale)	000EST


UTILIZZO ED INDICAZIONI

L'apparecchio professionale Fisiopress FP 50 ad6 settori di uscita è di tipo portatile grazie alle sue ridotte dimensioni ed al peso contenuto. Tale sistema è indicato:

- Il trattamento della ritenzione idrica.
- Il trattamento della cellulite.
- La terapia dell'insufficienza venosa e di tutte le sue conseguenze (gambe gonfie e dolenti, ulcere, edema, vene varicose ecc...).
- La terapia delle linfostasi (linfoedema, edema, ecc...)
- La prevenzione di tali problemi e del loro aggravarsi.
- E' inoltre di facile associazione con altri trattamenti estetici o terapie mediche utilizzate per prevenire o attenuare gli inestetismi e le patologie sopra descritte.



La filosofia del sistema Fisiopress FP 50 segue una impostazione definita “pressoterapia naturale” in quanto il massaggio che esegue spinge i fluidi che ristagnano lungo la loro direzione “naturale” svolgendo una azione del tutto congrua con quella fisiologica del nostro organismo. Si compone di 4 elementi:

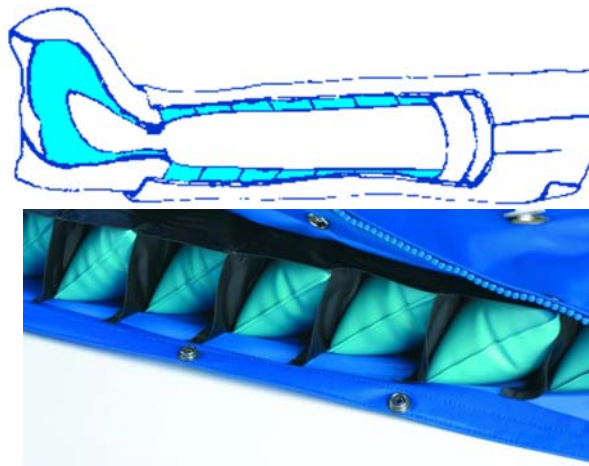


- CICLO REALMENTE SEQUENZIALE
- SETTORI COMPRESSIVI INTERNI AI TERMINALI PARZIALMENTE SOVRAPPOSTI
- SISTEMA PROPRIETARIO D.A.S.C. PER IL MANTENIMENTO OMOGENEO DELLA PRESSIONE NEI SETTORI
- VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE REALMENTE ESERCITATA

Il concetto di pressoterapia naturale quindi si basa su una azione svolta dall'apparecchio il più simile possibile a quella esercitata da un bravo operatore che si pone l'obbiettivo di scaricare i liquidi che ristagnano all'interno dell'arto da trattare, rimettendo in moto il meccanismo fisico, non è più ben funzionante spingendo i fluidi nella loro direzione fisiologica.

Gli 8 settori in cui gambali e bracciali (terminali) sono suddivisi permettono una continuità ed omogeneità della spinta che nessun altro apparecchio di pressoterapia è in grado di esercitare.

Non solo l'azione generata è altamente efficace, ma la sensazione provata dalla persona che sta facendo il trattamento è gradevolissima ed estremamente rilassante.

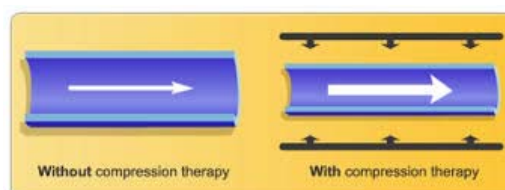

RISULTATI

I risultati ottenibili utilizzando un sistema di pressoterapia realmente sequenziale ad azione naturale sono:

- drenaggio dei liquidi in eccesso
- ripristino degli scambi idrici
- diminuzione del volume dell'arto
- prevenzione della cellulite
- sensazione di leggerezza dell'arto
- miglioramento della circolazione venosa
- miglioramento della circolazione linfatica



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressoterapia sequenziale a gradiente di pressione distale-proximale.
- Sistema ad indirizzo portatile-professionale, dotato di 6 uscite sequenziali, capace di trattare uno o due arti contemporaneamente.
- Possibilità, inoltre, di collegare contemporaneamente una coppia di gambali e la fascia addominale.
- Range di pressione: 0 - 160 mm di Hg. su un terminale.
- Ciclo operativo: 30 secondi.
- Sistema D.A.S.C. (Distribuzione a settori comunicanti): tale sistema, unico Fisiopress, permette di avere una pressione sempre omogenea in tutte le camere man mano che si riempiono di aria, permettendo così ai terminali di adattarsi alla geometria dell'arto trattato e comprimerlo uniformemente senza pericolo di ristagni o flussi inversi.
- Spia di spegnimento a fine terapia in fase di sgonfiaggio.
- Timer elettronico programmabile.
- Spegnimento automatico a fine terapia in fase decompressiva.
- Terminali disponibili per arto inferiore: gambale e piede (6 settori) separati per un migliore adattamento alla lunghezza dell'arto trattato.
- Fascia addominale (2 settori)

- Estensore per aumentare la dimensione circolare del gambale.
- Terminali disponibili per arto superiore: bracciale (6 settori).
- Tutti i terminali hanno i settori interni paralleli e parzialmente sovrapposti.
- Possibilità di sostituzione individuale di ciascuna sacca pneumatica interna.
- Certificazione estetica.