

fisiopress

FP 250

PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE PROFESSIONALE
VERSIONE MEDICALE





APPARECCHIATURA E SUOI ACCESSORI

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Unità base | 0250UB |
| Unità base Digitale | 0250UBD |
| Gambale/piede (8 settori) | 0250G7/000PNT |
| Bracciale (8 settori) | 0250B8 |
| Braccio-mano separata (8 settori) | 0250B6M2 |
| Fascia Addominale (2 settori) | 000FA2 |
| Set di Duplicazione a Marsupio | 0250SD8 |

UTILIZZO ED INDICAZIONI

L'apparecchio Fisiopress FP 250, nelle versioni Digital (nella foto) e Standard (con manometro analogico) è un sistema ambulatoriale indicato nelle patologie venose e linfatiche, per drenare la componente liquida dei fluidi, sgonfiare l'arto e ripristinare in normale equilibrio pressorio. Il ciclo operativo, rapido ed efficiente, insieme al disegno pratico ed ergonomico dei terminali (facilmente gestibili dall'operatore tramite il semplice set di duplicazione a marsupio) consente di esercitare una efficace compressione e di ridurre l'edema in breve tempo. Il sistema, pur essendo professionale ad indirizzo ambulatoriale è di dimensioni ridotte e può essere collocato facilmente in piccoli ambulatori e non necessita di alcuna manutenzione. Può essere facilmente spostato insieme al gruppo dei terminali senza togliere alcuna connessione, facilitando così la gestione del lettino quando questi deve essere utilizzato per terapie diverse. Nell'uso professionale sono disponibili semplici linee guida per un uso appropriato dello strumento, che, correlate ad una letteratura scientifica appropriata, permettono di ottenere i migliori risultati che la metodica può offrire. Si consiglia sempre di inserire la metodica stessa all'interno di un protocollo terapeutico integrato. L'apparecchio è dotato di marchio CE medicale, ma è disponibile una versione per il solo utilizzo in ambito estetico (vedi relativa scheda tecnica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressoterapia sequenziale a gradiente di pressione distale-proximale distribuito su 8 uscite, capace di trattare uno o due arti contemporaneamente.
- Range di pressione: 0 - 160 mm di Hg. (su un terminale applicato).
- Ciclo operativo: 30 secondi.
- Grande Display Digitale retroilluminato per la visualizzazione dei valori di pressione, tempo di trattamento programmato e tempo residuo, e delle soglie di allarme pre-impostate.
- Grafico delle pressioni e delle funzioni programmabili.
- Allarmi sulle pressioni elevate (acustico e spegnimento automatico).
- Allarmi sulle basse pressioni (acustico, per distacco di connessione..)
- Regolazione elettronica del tempo di trattamento, sia in automatico che in manuale.
- Sistema D.A.S.C. (Distribuzione a settori comunicanti): tale sistema, unico Fisiopress, permette di avere una pressione sempre omogenea in tutte le camere man mano che si riempiono di aria, permettendo così ai terminali di adattarsi alla geometria dell'arto trattato e comprimerlo uniformemente senza pericolo di ristagni o flussi inversi.
- Spegnimento automatico a fine terapia in fase di sgonfiaggio.
- Terminali disponibili per arto inferiore: gambale e piede (8 settori), separati per un migliore adattamento alla lunghezza dell'arto trattato. Quattro possibilità di regolazione della dimensione circolare tramite chiusure lampo apposite.
- Possibilità di collegare contemporaneamente una coppia di gambali e la fascia addominale.
- Fascia addominale (2 settori) o Fascia Addominale a 4 settori.
- Terminali disponibili per arto superiore: bracciale (8 settori). Tre possibilità di regolazione della dimensione circolare tramite chiusure lampo apposite.
- Bracciale 8 settori con mano separata. Tre possibilità di regolazione della dimensione circolare tramite chiusure lampo apposite.
- Tutti i terminali hanno i settori interni paralleli e parzialmente sovrapposti.
- Possibilità di sostituzione individuale di ciascuna sacca pneumatica interna.
- Terminali interamente cuciti a mano.
- Marchio CE medicale